

Produktdatenblatt

Aktivin® PuraBakt Tücher

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

Beschreibung/ Eigenschaften:	Aktivin® PuraBakt Tücher sind gebrauchsfertige, mit einer alkoholischen Desinfektionslösung getränkte Tücher zur Desinfektion von Flächen in hygienisch sensiblen und patientennahen Bereichen. Ein Nachwischen der Fläche ist bei der Anwendung von Aktivin® PuraBakt Tücher nicht erforderlich. Neben einer Wirkung gegen Bakterien (inklusive MRSA und Mykobakterien) und Hefepilze werden auch behüllte Viren sowie Rota- und Noroviren sicher und schnell inaktiviert. pH-Wert: 6 – 8
Zusammensetzung:	In 100 g Lösung sind enthalten als wirksamer Bestandteil: 45,0 g Ethanol Parfümfrei, keine auf der Fläche verbleibenden Inhaltsstoffe.
Anwendungsgebiete:	Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen und Materialien. Aktivin® PuraBakt Tücher können zur Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen verwendet werden. Sie sind besonders geeignet für: - patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen - Arbeitsflächen - Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluss zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist. Geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko.
Wirkungsspektrum:	Aktivin® PuraBakt Tücher wirken: - bakterizid (inkl. MRSA) - tuberkulozid - levurozid (c. albicans) - virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-/Grippe-/Noro-Viren)
Anwendung:	Aktivin® PuraBakt Tücher sind gebrauchsfertig und können direkt zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten eingesetzt werden. Oberflächen bis zur völligen Benetzung abwischen. Flächen anschließend vollständig abtrocknen lassen. Nach Entnahme des Tuches ist der Deckel des Spendersystems unmittelbar wieder zu schließen, um ein Verdunsten der Desinfektionslösung und eine mögliche Kontamination zu verhindern. Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel des Spendersystems reinigen und desinifizieren. Nicht anwenden bei alkoholempfindlichen Oberflächen (Acrylglas)!

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 33 00

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Telefon +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Telefax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert


DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 14001

Einwirkzeiten:	Einwirkzeiten (für die Tränkflüssigkeit Aktivin® PuraBakt Fläche)				
	Wirkspektrum		30 Sek.	1 Min.	2 Min.
	Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH (bakterizid, levurozid) (* gelistet in der 5Min.-Spalte der VAH-Liste)	mit Mechanik, hohe Belastung		x	
	mit Mechanik, geringe Belastung		x		
	ohne Mechanik, hohe Belastung			x*	
wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV (begrenzt viruzid)	gem. RKI/DVV	x			
	Vaccinia-Virus	x			
	BVDV	x			
Rota-Virus	gem. EN 14476	x			
Noro-Virus (MNV)	gem. EN 14476, geringe Belastung		x		
tuberkulozid (M. terrae)	gem. EN 14348, geringe Belastung	x			
	Wirkspektrum				
	EN 1276	bakterizid, geringe Belastung		x	
	EN 1276	bakterizid, hohe Belastung		x	
	EN 1650 (C. albicans)	levurozid, geringe Belastung		x	
	EN 1650 (C. albicans)	levurozid, hohe Belastung		x	
	EN 13697	bakterizid, geringe Belastung		x	
	EN 13697	bakterizid, hohe Belastung		x	
	EN 13697 (C. albicans)	levurozid, geringe Belastung		x	
	EN 13697 (C. albicans)	levurozid, hohe Belastung		x	
	Geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko	gem. VAH Empfehlung September 2014 zu Tuchspendersystemen	x		
	Geeignet zur Verwendung in Bereichen ohne besonderem Infektionsrisiko	gem. VAH Empfehlung September 2014 zu Tuchspendersystemen	x		
Besondere Hinweise:	Entzündbarer Feststoff. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.				
Verpackungsgrößen:	70 Tücher Spendereimer, 120 Tücher Spenderbox, 120 Tücher Nachfüllpackung				
Produktstatus:	Registriert als Biozidprodukt baua Reg.- Nr. N-66146				

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 33 01

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Telefon +49 [0] 61 28 / 97 57 0
Telefax +49 [0] 61 28 / 97 57 50
info@wero.de - www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 14001



Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Stand: Februar 2017, FÜ

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Telefon +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Telefax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 14001